




Groupe d'auteurs : E. Dorard, M. Cambillau, B. Mougne, F. Annane, M-D Cordin, Ch. Augereau, D. Chevassus, D. Fausot, Ch. Julien, B. Mangin, C. Guihaire, O. Cathelin, L. Ulrich, J. Pinto, Ch. Barteau, J. Chevalier.

I- Matériel de prélèvements

Adaptateur Luer BD Vacutainer

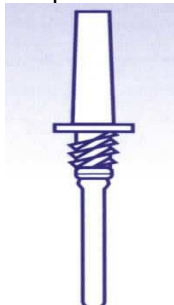

Aiguilles Sécurité BD Eclipse



Unités Sécurité automatiques Pro-active BD vacutainer













Unités BD Vacutainer à prélèvement de sang sur catheter



II- Contenants




Tubes pour prélèvement

Bouchon et ordre de prélèvement	Désignation	Principales applications
	Ref : 362725 Tube neutre sans additif 3 ml	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tube de purge (de première intention sauf si hémoculture) ✓ LCR, liquide de ponction (épanchement, cytoponction d'organe) ✓ Lithium
	Ref : 454325 Tube Citrate de Sodium 3.2% 3 ml bague noire	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tests de coagulation pour patient SANS traitement par l'héparine ✓ Fonctions plaquettaires, PFA, facteur Willebrand
	Ref : 474304 Tube CTAD 3 ml bague jaune	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tests de coagulation pour patient traité par héparine
	Ref : 454321 Tube Citrate de Sodium 3.2% 2 ml	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tests de coagulation pour patient très difficile à prélever
	Ref : 368496 Tube Héparinate de Lithium 4 ml	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ionogramme, bilan hépatique, CRP, Troponine... ✓ Médicament hors immunosuppresseur
	Ref : 368857 Tube EDTA K3 3 ml	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Groupe RH, RAI ✓ Numération ✓ BNP, Hémoglobine glyquée et variants d'Hémoglobine ✓ Immunosuppresseur
	Ref : 368860 Tube EDTA K3 4 ml	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Examen de Génétique ✓ Examen du complément
	Ref : 367957 Tube sec avec gel séparateur 3.5 ml	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Bilan lipidique, thyroïdien, marqueur tumoral, hCG ✓ Auto-immunité ✓ Sérologie virale ✓ 25 OH vitamine D
	Ref : 369032 Tube sec avec activateur de coagulation 4 ml Transport en thermos contenant de l'eau à 37°C	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Cryoglobuline
	Ref : 368381 Tube pour dosage des éléments trace 6 ml	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Zinc et autre oligo-élément







Tubes pour prélèvement

Bouchon et ordre de prélèvement	Désignation	Principales applications
	Ref : 362725 Tube neutre sans additif 3 ml	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tube de purge (de première intention sauf si hémoculture) ✓ LCR, liquide de ponction (épanchement, cytoponction d'organe) ✓ Lithium
	Ref : 474065 Tube CTAD 2 ml bague jaune	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tests de coagulation excepté tests « fonctions plaquettaires, PFA, facteur Willebrand » pour lesquels il faut demander des tubes citratés au magasin médical.
	Ref : 368496 Tube Héparinate de Lithium 4 ml	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ionogramme, bilan hépatique, CRP, Troponine... ✓ Médicament hors immunosuppresseur
	Ref : 368857 Tube EDTA K3 3 ml	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Groupe RH, RAI ✓ Numération ✓ BNP, Hémoglobine glyquée et variants d'Hémoglobine ✓ Immunosuppresseur
	Ref : 367957 Tube sec avec gel séparateur 3.5 ml	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Bilan lipidique, thyroïdien, marqueur tumoral, hCG ✓ Auto-immunité ✓ Sérologie virale ✓ 25 OH vitamine D
	Ref : 369032 Tube sec avec activateur de coagulation 4 ml Transport en thermos contenant de l'eau à 37°C	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Cryoglobuline



Tubes pour prélèvement

Bouchon et ordre de prélèvement	Désignation	Principales applications
	Ref : 362725 Tube neutre sans additif 3 ml	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tube de purge (de première intention sauf si hémoculture) ✓ LCR, liquide de ponction (épanchement, cytoponction d'organe) ✓ Lithium
	Ref : 474065 Tube CTAD 2 ml bague jaune	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tests de coagulation excepté tests « fonctions plaquettaires, PFA, facteur Willebrand » pour lesquels il faut demander des tubes citratés au laboratoire d'hémostase de l'HEGP (tel 01 56 09 38 54)
	Ref : 368496 Tube Héparinate de Lithium 4 ml	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ionogramme, bilan hépatique, CRP, Troponine... ✓ Médicament hors immunosuppresseur
	Ref : 368857 Tube EDTAK3 3 ml	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Groupe RH, RAI ✓ Numération ✓ BNP, Hémoglobine glyquée et variants d'Hémoglobine ✓ Immunosuppresseur
	Ref : 367957 Tube sec avec gel séparateur 3.5 ml	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Bilan lipidique, thyroïdien, marqueur tumoral, hCG ✓ Auto-immunité ✓ Sérologie virale ✓ 25 OH vitamine D
	Ref : 369032 Tube sec avec activateur de coagulation 4 ml Transport en thermos contenant de l'eau à 37° C	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Cryoglobuline



Hôpitaux Universitaires Paris Ouest

Systeme Sarstedt pour prélèvement d'urine

Contenant	Désignation
	Ref : 75 562400 Pot de recueil 100ml
	Ref : 11 2253002 ECU
	Ref : 77 575400 Conteneur de recueil 3L
	Ref : 11 2252001 Autres Analyses Urinaires